

Mascarilla de protección

MX-FFP2-N95

- Categoría o nivel de protección FFP2
- Cumple con la normativa EN 149:2001+A1:2009
- Absorción de polvo, humo y partículas de hasta 2,5 µm (PM2.5)
- Absorción y reducción del olor
- Nivel de filtración superior al 95%
- Tres capas de filtrado
- Anatómicas, se adaptan perfectamente al contorno de la cara
- Incluye clip nasal que mejora la adaptación al contorno de la nariz
- Embaladas individualmente



Mascara para la
protección diaria

KN95



Protección múltiple



Ligera y transpirable
con 5 capas



Retención de
partículas líquidas

Instrucciones



1 Sujete la mascarilla por las bandas elásticas y colóquela en la cara apoyándola sobre la barbilla, después ajústela hacia a la nariz.



2 Coloque los dedos en el medio del clip nasal y presione ambos dedos mientras mueve las yemas de los dedos a ambos lados a lo largo del clip nasal, hasta que el clip nasal se ajuste completamente a la forma del puente de la nariz.



3 Tire de las bandas elásticas hacia atrás y colóquelas en la parte posterior de ambas orejas.



4 Compruebe que la mascarilla está correctamente acoplada a la cara, para ello cubra la mascarilla con ambas manos y exhale. Si sale mucho aire por los bordes de la mascarilla deberá ajustársela nuevamente.

CE FFP2

Importado por:

MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 - MADRID

Teléfono de información y
Servicio Técnico: 902 551 501

E-MAIL: info@mxonda.es
<http://www.mxonda.es>

Artículo	Código EAN	U/por caja:
470.24-PT	8413366470240	80



"MX, MX ONDA" y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S. A.
info@mxonda.es
www.mxonda.es